



 **smith&nephew**
INTRASITE[®] GEL
Hidrogel

Hidrogel de acción limpiadora y
regeneradora de todo tipo de heridas

INTRASITE[®] GEL, hidrogel de acción limpiadora y regeneradora de todo tipo de heridas

Estimula la cicatrización de la herida

Limpia los restos necróticos

Absorbe el esfacelo

Fácil aplicación y cambio

INTRASITE GEL es un hidrogel de acción limpiadora y regeneradora de las heridas. INTRASITE GEL utiliza las ventajas comprobadas de la cura húmeda, siendo al mismo tiempo capaz de eliminar los restos necróticos, el exceso de exudado y regenerando el tejido de granulación.

INTRASITE GEL es apropiado para limpiar la herida en sus fases iniciales de curación. Asimismo, puede utilizarse para proporcionar un entorno húmedo y óptimo durante las fases de granulación y epitelización.

Beneficios

Limpieza

Los restos necróticos deben ser eliminados para favorecer la recuperación tisular, por lo que es fundamental, al inicio del tratamiento de la herida, una cuidadosa limpieza. INTRASITE GEL es un hidrogel fácil de aplicar y retirar y por su acción rehidratante, progresiva y eficaz, y estimula el proceso de autólisis. Al incrementar la humedad en esta fase de la herida, se facilita el medio ideal para la regeneración tisular.

Absorción del esfacelo

En la fase inflamatoria del proceso de curación de la herida, la escara está formada por la acumulación de células muertas en el exudado. Drenando el exceso de exudado de la superficie de la herida, INTRASITE GEL detiene la acumulación de los restos celulares y evita la formación de la escara. En otros casos, cuando ya está formada la escara, la acción rehidratante del gel la elimina lenta y eficazmente, sin dañar el tejido sano neoformado.

Granulación

Favorece una curación rápida. INTRASITE GEL crea un ambiente húmedo en el seno de la herida, evitando la formación de escara y estimulando la formación del tejido de granulación.

Fácil de aplicar

Gracias a su exclusivo envase, que incorpora una boquilla anatómica, INTRASITE GEL resulta cómodo y fácil en el tratamiento de heridas profundas y de difícil acceso. Permite, además, controlar la salida del gel.

Fácil de retirar

INTRASITE GEL no se adhiere al tejido, de forma que resulta sencilla su retirada. Para ello se debe eliminar el gel, simplemente irrigando la lesión con solución salina estéril. No produce dolor, ni precisa manipulación posterior.

Cambio del gel

INTRASITE GEL debe retirarse si el exudado traspasa el apósito secundario. La frecuencia de cambio dependerá del tipo de herida y de la cantidad de exudado:

Heridas necróticas: diariamente, para optimizar la rehidratación de la herida.

Heridas con esfacelos: diariamente, para optimizar la limpieza.

Heridas en granulación: por lo menos una vez cada tres días.

Indicaciones

INTRASITE Gel está indicado para la eliminación de tejido necrótico de lesiones superficiales, profundas y socavadas (p.ej úlceras por presión, úlceras de pierna, úlceras de pie diabético, lesiones malignas, quemaduras, lesiones quirúrgicas, escaldaduras, laceraciones, rozaduras, amputaciones y úlceras fungosas). También para el tratamiento de lesiones cavitadas en estado de granulación, piel escoriada y quemaduras provocadas por radiación.

INTRASITE GEL puede utilizarse en heridas infectadas bajo supervisión médica.

Instrucciones de uso

1. Preparar el lecho de la lesión: Retirar el apósito secundario. Irrigar la úlcera con solución salina estéril para limpiar el lecho de la lesión.

2. Preparar el envase: Retirar de la boquilla el tapón protector. Limpiar el extremo y la boquilla del envase con una torunda antiséptica adecuada. Romper por el extremo marcado de la boquilla.
3. Introducir INTRASITE GEL en la lesión: Manteniendo el extremo de la boquilla de manera que no entre en contacto con la superficie de la lesión, presionar con cuidado la base del envase para administrar el gel en la lesión, evitando no excederse sobre la piel circundante. Aplicar una capa de INTRASITE GEL de aproximadamente 5mm de espesor sobre la superficie de la lesión. Desechar el sobrante.

Elección del apósito complementario

INTRASITE GEL debe usarse junto con otro apósito. Las características de la herida y la frecuencia del cambio de apósito determinan la elección del apósito secundario apropiado. Ejemplos de apósitos son: ALLEVYN[®], OPSITE[®], MELOLIN[®], CARBONET[®].

Precauciones

Sensibilidad a INTRASITE GEL o a alguno de sus ingredientes (propilenglicol). Para uso externo solamente. Usar con precaución en las zonas cercanas al ojo y en heridas profundas con aberturas estrechas (fistulas) y en cavidades donde la retirada del gel pueda ser dificultosa. INTRASITE GEL es solamente para uso externo y no debe ser ingerido.



Presentaciones

Código	C.N.	Medidas	Envase
66000240*	4560202.6	15 g	5u
7311		15 g	10u

Curación de Heridas
Smith & Nephew, S. A.
Fruituós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 902 303 160, Fax: 902 303 170

EducacionAWM@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com/es/

* Marca registrada de Smith & Nephew
© Smith & Nephew 2001

* Productos financiados por el SNS. Las indicaciones autorizadas con cargo al SNS son UPP y UV.