



smith&nephew
INTRASITE[®]
CONFORMABLE
Apósito adaptable de hidrogel

Hidrogel de acción limpiadora y
regeneradora de todo tipo de heridas

INTRASITE[®] CONFORMABLE, apósito adaptable de hidrogel

Para el tratamiento de heridas superficiales, profundas, abiertas y socavadas

Suave, adaptable y con baja adherencia

Mantiene el ambiente húmedo

INTRASITE CONFORMABLE combina las ventajas de INTRASITE[®] GEL con un apósito de tejido no tejido que ayuda en el llenado de las heridas superficiales, cavitadas, abiertas o socavadas. El soporte del tejido no tejido asegura que el gel permanece en contacto con la totalidad de la superficie de la herida. Es adecuado para usar en heridas necróticas, esfaceladas y con tejido de granulación, y ayuda a crear un ambiente húmedo adecuado que facilita la cicatrización.

Beneficios

Elimina tejido necrótico y esfacelado

INTRASITE CONFORMABLE elimina esfacelos y tiene una acción desbridante suave pero efectiva a través de la absorción de esfacelos y de la rehidratación del tejido necrótico. El apósito absorberá el exceso de exudado.

Adaptable

INTRASITE CONFORMABLE se adapta fácilmente a las formas difíciles. Facilita el llenado delicado de heridas profundas, permitiéndoles cicatrizar desde su base y proporcionando una barrera física que previene el cierre en falso de la herida.

Cura en ambiente húmedo

INTRASITE CONFORMABLE mantiene el ambiente húmedo en la superficie de la herida, previene la adherencia y permite realizar los cambios de apósito fácilmente y sin dañar el tejido neoformado.

Indicaciones

INTRASITE CONFORMABLE está indicado para el manejo de heridas crónicas especialmente profundas o cavitadas, como son las úlceras por presión o heridas quirúrgicas abiertas.

Rehidrata de forma suave el tejido necrótico

Acción desbridante efectiva

Absorbe esfacelos y exudado

Mantiene el gel en contacto íntimo con la superficie de la herida

Instrucciones de uso

1. Abrir el sobre.
2. Retirar el apósito completamente y desplegar si fuera necesario.
3. Dependiendo del tipo de herida, aplicar el apósito rellenando sin presionar o cubrir la herida.
4. Cubrir con un apósito secundario adecuado, como por ejemplo un film (OPSITE[®] FLEXIGRID[®]) o un apósito absorbente (ALLEVYN[®])
5. Para cambiar el apósito, retirar suavemente con fórceps e irrigar la herida con solución salina. Asegurarse que todo el apósito ha sido retirado. Se recomienda cambiar el apósito como máximo cada tres días.

Precauciones

Sensibilidad conocida a INTRASITE CONFORMABLE o a alguno de sus ingredientes. No ingerir. Evite el uso en pezones agrietados. Debe utilizarse con cuidado en las zonas cercanas al ojo.



Presentaciones

Código	Medidas	Envase
66000724* CN 490730.8	10 x 20 cm	5 u.
66000325	10 x 20 cm	10 u.
66000326	10 x 40 cm	10 u.

* Reembolsable por la Seguridad Social

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 93 373 74 53

EducacionAWC@smith.nephew.com
www.smith-nephew.com/es/

*Marca registrada de Smith & Nephew
© Smith & Nephew